



OPERATION NOTES




1. Před použitím si umyjte ruce. Otevřete krabici, vyndejte tyčinku s odběrovým tamponem, lahvičku a testovací kartu.

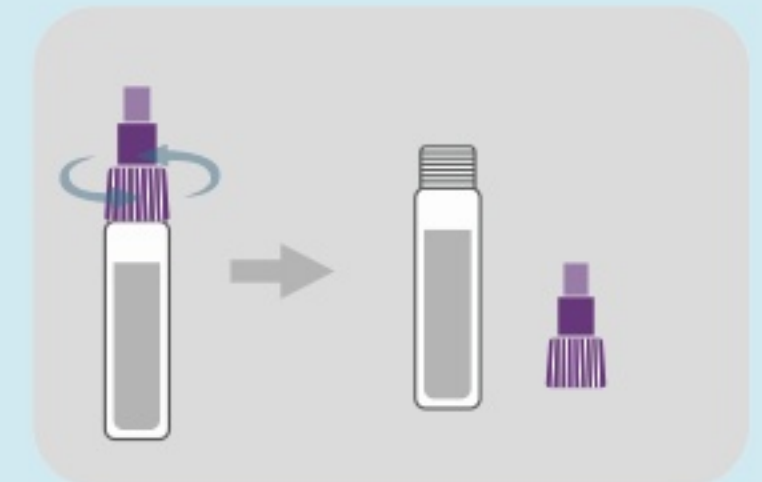

2. Odšroubujte víčko lahvičky, viz obrázek 2

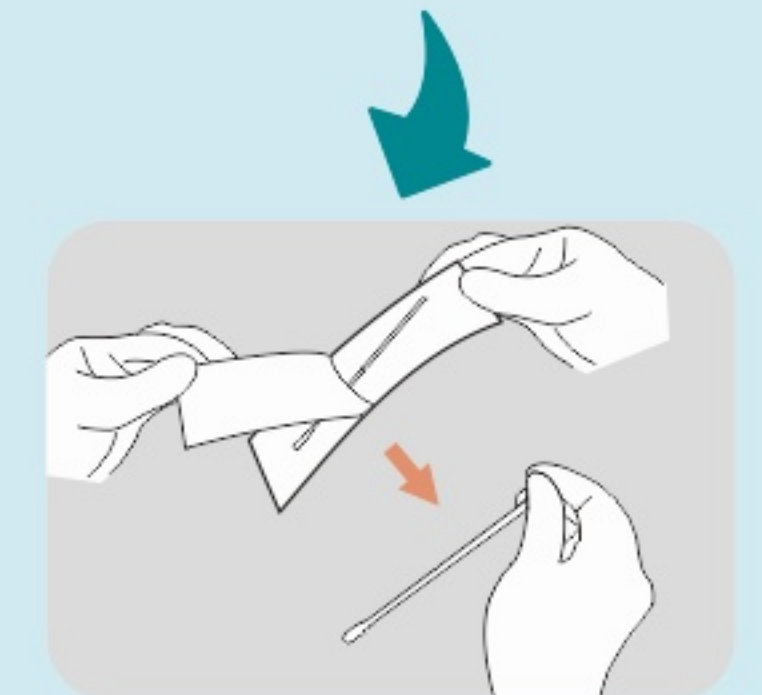


3. Roztrhněte obal tyčinky s tamponem, uchopte za tyčinku a opatrně sundejte obal. Tampon na konci odběrové tyčinky by se neměl dotknout ničeho jiného, než vnitřní strany nosu.

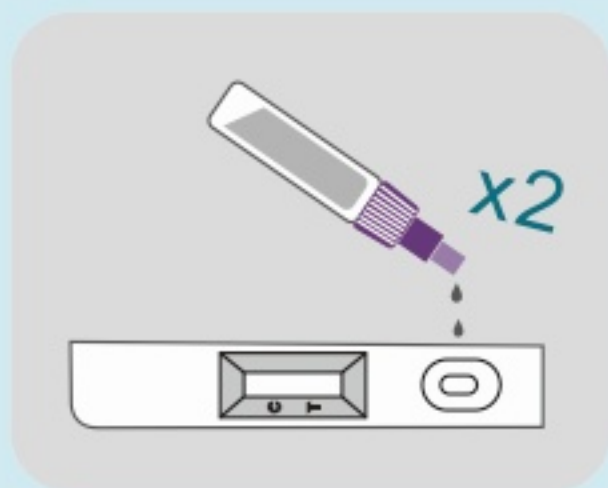

6. Odšroubujte menší víčko lahvičky a kápněte 2 kapky tekutiny se vzorkem do oválné jamky v testovací kartě.



10-15min

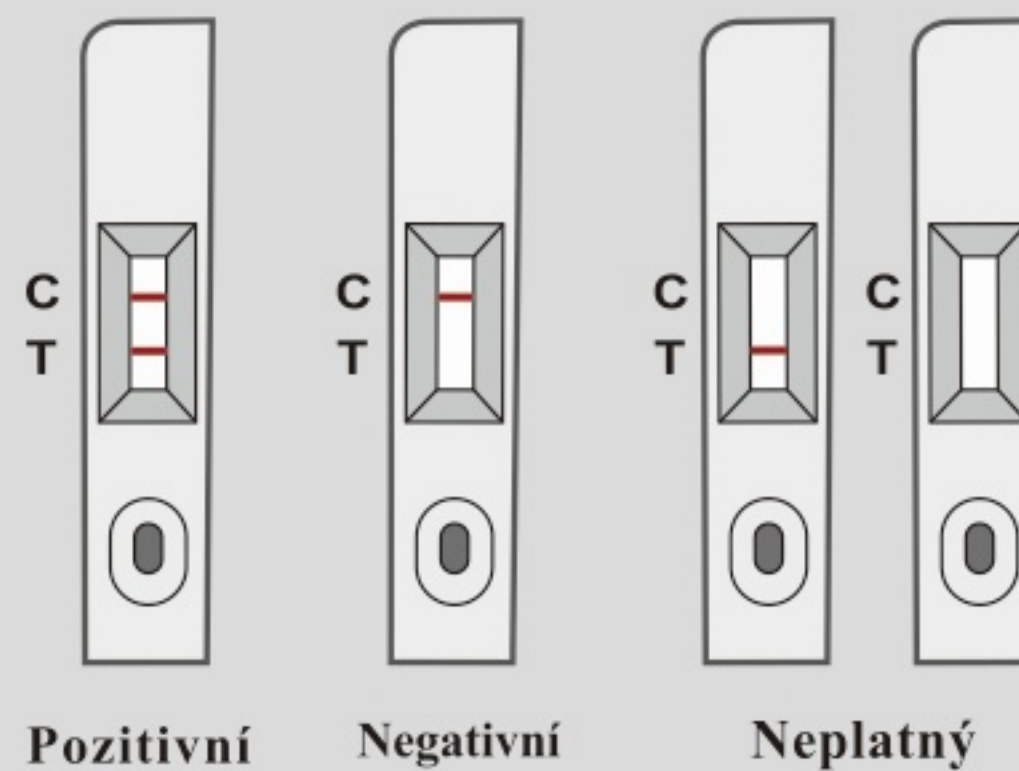


Pozitivní

Negativní


Neplatný

7. Okamžitě po nakapání začněte měřit čas a po 10-15 minutách odečtěte výsledky z karty.

Odečtěte výsledky podle tohoto obrázku. Pokud je výsledek neplatný, test opakujte. Pokud je výsledek pozitivní (2 čárky), neprodleně se izolujte a informujte svého praktického lékaře.

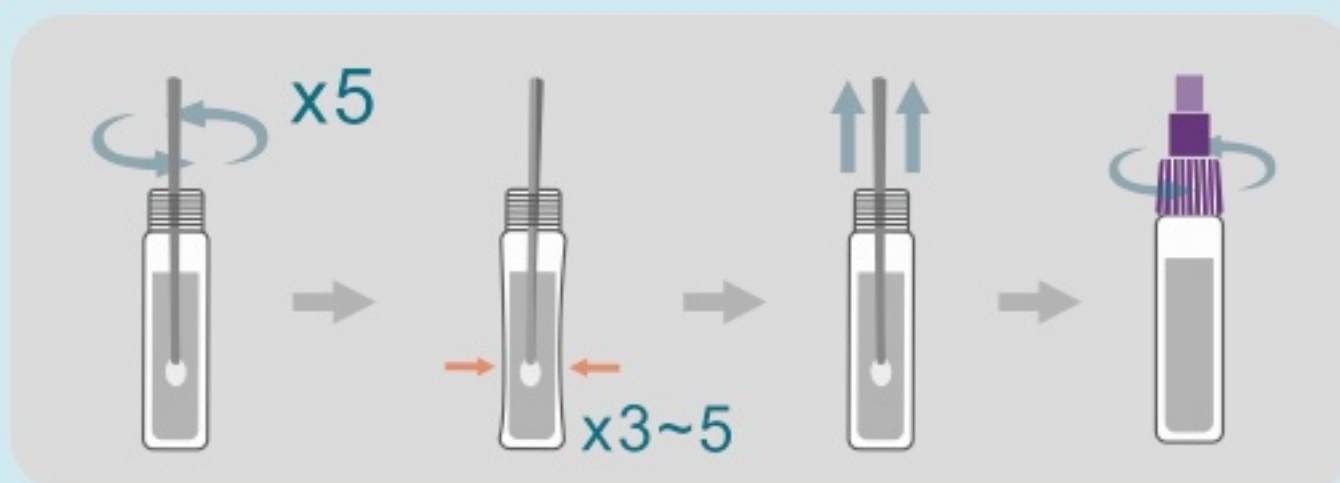

5. Vložte tampon do lahvičky a nejméně pětkrát zamíchejte kapalinu a zmáčkněte tampon o stěnu lahvičky, aby došlo k vytečení vzorku z tamponu. Vyndejte tampon a pevně uzavřete lahvičku.

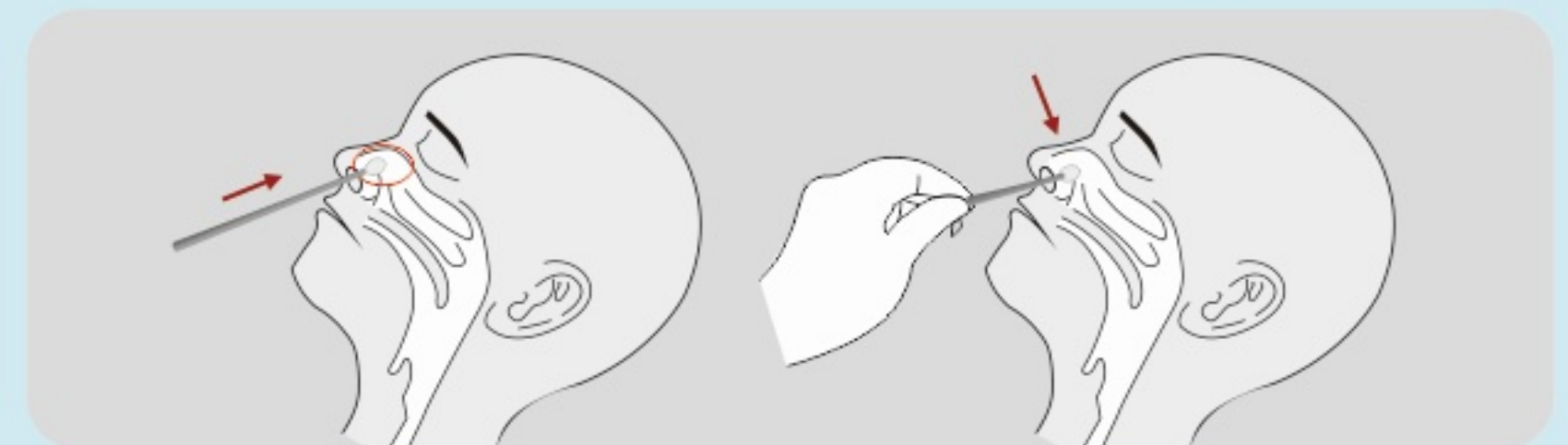

4. Výtěr z nosu: Vložte odběrový tampon do nosní dírký s největší sekrecí. Jemně točte a zatlačte do nosní dutiny, dokud neucítíte odpor (cca 2 cm), poté třikrát přitlačte tampon ke stěně nosu, vyjměte tampon z nosu a rychle ponořte do extrakčního pufru.