



SAFECARE BIO-TECH

SAFECARE COVID-19 Ag

COVID-19 Antigen Rapid Test Device(Swab)

Rychlý test na detekci Antigenu Covid-19 je laterální imunotest určený ke kvalitativní detekci antigenu nukleokapsidového proteinu z přímých nosních výtěrů nebo ze vzorků odebraných výtěrů z nosohltanu u jedinců podezřelých z nákazy koronavirem Covid-19 během prvních sedmi dnů od nástupu příznaků.



SAFECARE COVID-19 Ag Rapid test kit

Účel použití: Detekce antigenu SARS-CoV2

Balení: 25 testů

Skladování: 4-30 °C

Typ vzorku: Výtěr z nosu


Doba použitelnosti: 24 měsíců

výsledek testu: 10-15 minut

PŘÍPRAVA VZORKU A POSTUP ZKOUŠKY


<Postup testu>

Příprava extrakčního roztoku

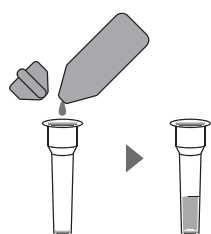


Do extrakční zkumavky přidejte 6 kapek extrakčního roztoku


Odběr tamponem z nosu

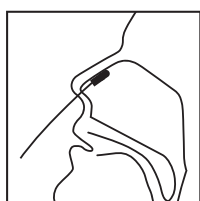


Odeberte vzorek od pacienta pomocí přiloženého výtěrového tamponu

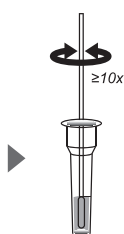


Promíchejte tampon s extrakčním roztokem

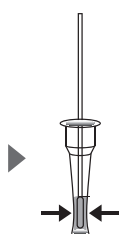

Stlačte zkumavku a vyjměte tampon, abyste z tamponu vytlačili tekutinu

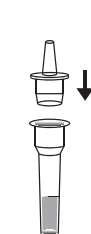


Nasadte víčko s kapátkem

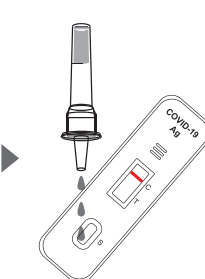

Kápněte 3 kapky vzorku do jamky na kazetě testu




10~15min


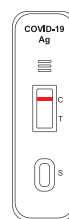


Odečtěte výsledek


INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

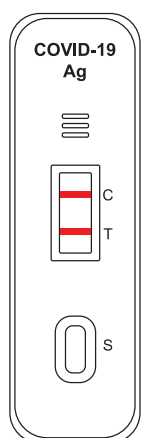


pozitivní

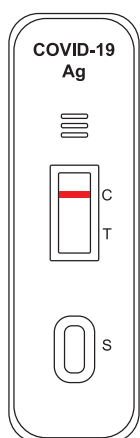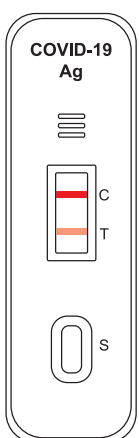

negativní

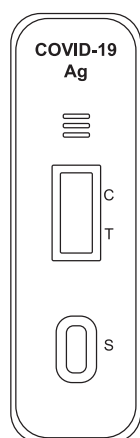

neplatný

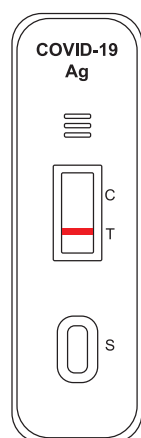

Výrobce: **Safecare Biotech Co., Ltd**